

Инструкция по сборке кровати общебольничной КМ-03

1. Соберите вместе раму, головную секцию, нижнюю и среднюю.


Используйте при этом болты M8x20, гайки M8, шайбы и втулки.

2. Установите растоматы на раму, используя гайки M 8. Растоматы устанавливаются вырезами к центру рамы.

3. Растоматы соединяются с нижней и средней секциями при помощи болтов M6x20, гаек M6 и дистанционных шайб.

4. Головная секция соединяется с растоматом при помощи болтов M8x20 и гаек M8. Дистанционная шайба не устанавливается.

5. Установите заглушки на трубы приваренные к внутренним частям секций..

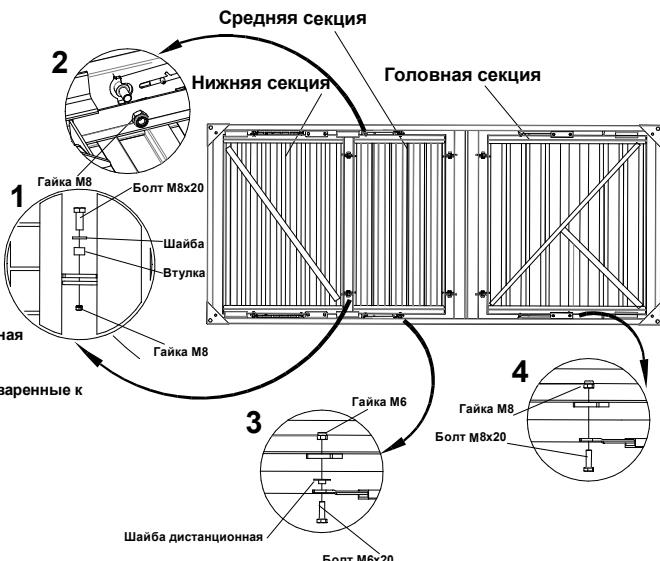

1

Ножка кровати КМ-03

Установите 2 поворотных колеса на 1 ножку кровати и 2 поворотных колеса с тормозом на другую ножку с помощью болтов M8x16, шайб 8 и гаек M8

Болт M8x16
Шайба 8 пл.
Гайка M8 шестигр.

Колесо
поворотное


Колесо
поворотное
с тормозом

2



3

Присоедините ножку кровати к раме с помощью болтов, шайб и гаек. Колеса с тормозом устанавливаются по диагонали кровати.

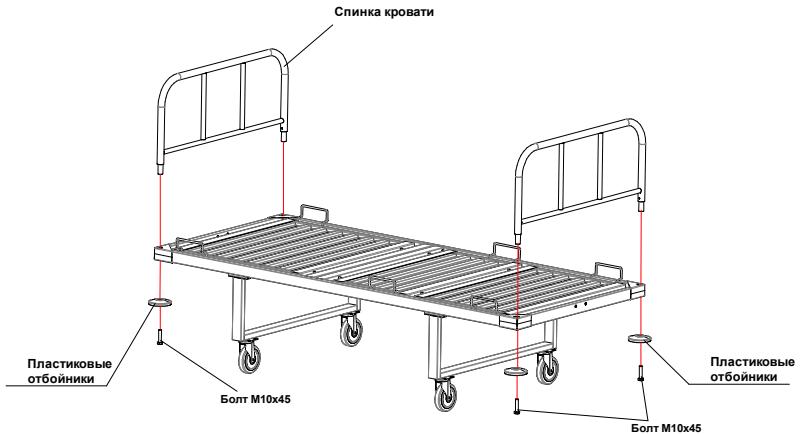

4

Установите спинки кровати . Для крепления спинок к раме используйте четыре болта M10 x 45 . На этом же этапе устанавливаются четыре пластиковых отбойника.

Пояснения к инструкции.

- Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
- Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

Примечания

- Отверстия под установку крепежных изделий, в случае необходимости очистить от краски.
- Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.